

Aanwijzingen voor het opvragen van de uitslag / Garantie informatie

LET OP! BEWAAR HET SERIE- EN CODENUMMER VAN UW TESTSET!

Deze codes heeft u nodig voor het verkrijgen van uw uitslag. U vindt deze codes op de binnen- of buitenzijde van het testpakket.

Monsterbegeleidingsformulier: Veld „praktijkgegevens”

Wanneer u wilt dat uw behandelend therapeut / arts uw uitslag ook ontvangt, vul dan in het veld 'praktijkgegevens' het praktijkadres in. (Wanneer er een praktijkcode bekend is, dan volstaat deze praktijkcode ook). Uw therapeut / arts ontvangt dan een uitslag met aanvullend therapie-advies. NB. aan particulieren worden nooit therapie adviezen verstrekt.

Na het invullen van serie-, codenummer en geboortedatum klikt u op 'uitslag opvragen' om uw persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam en adresgegevens) wenst, dan vult u op het monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten echt ingevuld worden, anders is er geen vergelijking mogelijk met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Download van uw uitslagen

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze website www.medivere.nl en klikt u op het tabblad 'uitslag opvragen'. Onder 'uitslag opvragen' vult u het serie- en codenummer van uw testpakket en uw geboortedatum in. Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons product. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren van de test iets misgegaan, neem dan contact met ons op. Kijk op www.medivere.nl bij 'vragen?', bel naar **088-0075733** of mail naar info@medivere.nl. Houd het serie- en codenummer van uw testset bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de binnen of buitenkant van uw testset. Wij sturen u zo spoedig mogelijk de benodigde onderdelen toe.



medivere GmbH Mainz

*vertegenwoordigd door:
Gamedi B.V.*

*Telefoon: +31 (0) 88-0075733
of info@medivere.nl*

Handleiding voor monsterafname

Eerste Ochtendurine gestabiliseerd

Vooraf: Lees eerst de handleiding **helemaal** door voordat u aan de uitvoering van de test begint!

Is uw testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of uw testset volledig is. Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Garantieformulier
- 1 Urinebuisje met stabilisator (zoutzuur) in verzendbuisje met waarschuwingssticker **(Let op: etsend!)**
- 1 Urinebeker
- 1 Verzendenvelop

Deze handleiding geldt voor de volgende testen:

*Candida
Organix®-neuro
Organix®-dysbiose*

Risico op letsel!
Let op: bewaar deze testset buiten het bereik van kinderen.



Om de meetresultaten bij de nitrostress urinetest niet te vervalsen, verzoeken wij u om minimaal 48 uur voor en tijdens de monsternaam af te zien van het gebruik van vitamine B12-preparaten.

Test-Voorbereiding

We verzoeken u met het onderstaande rekening te houden.

1. Vermijd de inname van grote hoeveelheden vloeistof (meer dan 1 liter) in de avond en nacht voor de monsternaam.
2. Let u er a.u.b. op, dat er minimaal 8 uur tussen de laatste maaltijd en de monsternaam zit.
3. **Belangrijke informatie voor vrouwen:** doe deze test niet tijdens uw menstruatie.

Test-Uitvoering

1. Gebruik voor de monsternaam van de eerste ochtendurine de urine halverwege: Laat eerst ca. 3 seconden urine in het toilet lopen. Vang vervolgens ca. 40 ml urine op in de urinebeker, zonder de urinestraal te onderbreken. De urinebeker moet ongeveer tot de helft gevuld worden. De overige urine laat u weer weglopen in het toilet.
2. Neem het urinebuisje met de stabilisator uit het verzendbuisje (met de waarschuwingssticker).
3. Giet de urine uit de urinebeker in het urinebuisje met de stabilisator. Het urinebuisje moet tot aan de 40 ml-markering gevuld zijn.

4. Sluit het urinebuisje zorgvuldig en draai 'm 2-3 maal ondersteboven.
5. Noteer op het etiket de naam van de monsternemer en de datum van monstername en plak het etiket op het urinebuisje.
6. Stop het urinebuisje in het verzendbuisje en sluit het verzendbuisje zorgvuldig.
7. De urine die nog in de urinebeker zit, giet u weer in het toilet.
8. De urinebeker kunt u met het huisvuil weggooien.
9. Doe het verzendbuisje samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de bijgesloten verzendvelop en stuur deze per post aan ons laboratorium retour.

De retourzending moet op maandag en dinsdag (voor de buslichting) plaatsvinden en niet in het week-einde of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team



*medivere GmbH Mainz
vertegenwoordigd door:
Gamedi B.V.
Telefoon: +31 (0) 88-0075733
of info@medivere.nl*