



HANDLEIDING

BACTERIËLE VAGINOSE TEST



LET OP! VOLG NAUWKEURIG DE HANDLEIDING

Anders kunnen de resultaten vertekend worden weergegeven en bieden ze geen garantie voor een nauwkeurige analyse.

Stap 1:

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Was uw handen voor aanvang van de test.
- Bepaalde omstandigheden kunnen de vaginale pH-waarde tijdelijk veranderen, wat de resultaten van de meting kan verstoren. Voor een nauwkeurige pH-waarde meting, houd rekening met de volgende richtlijnen:
 - Voer de meting minimaal 12 uur na geslachtsgemeenschap zonder condoom uit, omdat sperma de testresultaten kan beïnvloeden.
 - Wacht minimaal 12 uur na de vaginale toediening van medicatie zoals zetpillen, crèmes of gels.
 - Voer de meting niet uit tijdens de menstruatie en wacht tot minimaal 4 dagen na het einde van de menstruatie.
 - Wacht minimaal 15 minuten na het urineren om te voorkomen dat urinesporen het testresultaat verstoren.
 - Vermijd het wassen of douchen van de de vagina en de buitenste schaamlippen vlak voor de meting.
- LET OP! RISICO OP CHEMISCHE BRANDWONDEN!**
Het bijgevoegde droge uitstrijkstaafje mag vóór het afnemen NIET in aanraking komen met de vloeistof in het uitstrijkbuisje.



Stap 2: **VOORBEREIDING**

Controleer of de testset compleet is.

Als er onderdelen in de testset ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact met ons op. Wij zullen u zo spoedig mogelijk vervangend materiaal toesturen.

Stap 3: **HET UITVOEREN**

De instructies voor het uitvoeren van deze test vindt u in het binnenste gedeelte van dit document.

Stap 4: **HET VERZENDEN VAN HET MONSTER**

Bij temperaturen boven 25°C en onder 4°C, gooi het monster niet in de brievenbus, maar lever het af bij een PostNL afgiftepunt.

Verzend het pakket op maandag of dinsdag, niet in het weekend of vlak voor feestdagen. Breng de monsters op de dag van afname naar de post.

Inhoud:

1 Monsterbegeleidings-
formulie



1 Vaginale pH-zelftest



1 Vaginale uitstrijkset
(uitstrijkstaafje en
uitstrijkbuisje)

**Let op: Het uitstrijkbuisje
bevat een bijtende vloeistof.**



1 Etiket voor het invullen
van de pH-waarde


GANZIMMUN DIAGNOSTIK AG

Datum:

PH-Wert:

Name:

1 Verzendbuisje
voor het uitstrijkbuisje

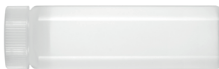

1 Retourenvelop



Stap 3: UITVOEREN



Nadat u alle "belangrijke opmerkingen" uit stap 1 zorgvuldig hebt gelezen, kunt u beginnen met de monsterafname.

Volg de volgende stappen nauwkeurig volgens de instructies. Alleen op deze manier kan een correcte uitslag worden gegarandeerd.

01

LET OP! De bijgevoegde uitstrijkwaardenstaaf mag vóór het afnemen NIET in aanraking komen met de vloeistof in het uitstrijkbusje. Gevaar voor bijtende stoffen!

Voor het uitvoeren van het vaginale uitstrijkje neemt u het bijgevoegde droge uitstrijkstaafje. Houd het droge uitstrijkstaafje aan het uiteinde tussen duim en wijsvinger vast.

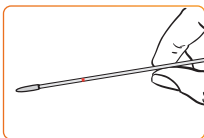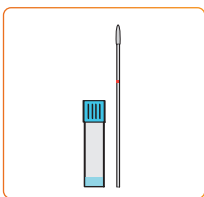


02

Houd het uitstrijkstaafje met één hand vast en spreid met de andere hand de schaamlippen.




03

Breng het uitstrijkstaafje met een draaiende beweging 4-5 cm in de vagina in en strijk ongeveer 20 seconden met enige druk langs de vagina-wand.

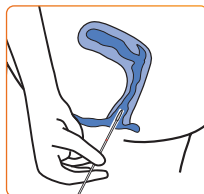


04

Draai de blauwe dop van het uitstrijkbusje open en steek het uitstrijkstaafje in de vloeistof.

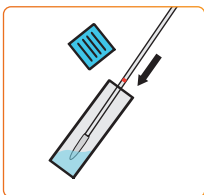


05

Breek het bovenste deel van het uitstrijkstaafje af aan de rand van het uitstrijkbuisje en sluit dit zorgvuldig af. Gooi het afgebroken deel weg.

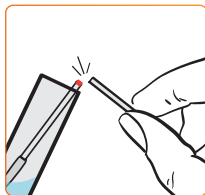

06


Plak een etiket met een achtcijferige barcode op het uitstrijkbuisje. U vindt de etiketten op het monsterbegeleidingsformulier.

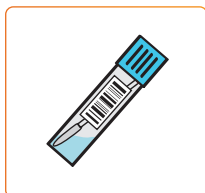

07

Let erop dat de indicator niet in aanraking komt met uw vingers of vloeistoffen!

Voor de bepaling van de pH-waarde haalt u de applicator uit de folie. Haal de applicator pas vlak voor de test uit de verpakking.

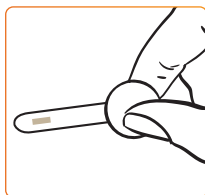


08

Houd de applicator bij het handgreepgebied tussen duim en wijsvinger (zie afbeelding 07). De duim moet zich aan de kant van de applicator bevinden waar geen pH-meetzone aanwezig is.

Ga zitten met gespreide benen of zet in staande positie een voet op de toiletbril of een andere stabiele ondergrond. Spreid met de vrije hand voorzichtig de buitenste schaamlippen voor de opening van de vagina.




Voer de applicator voorzichtig als een tampon 1-3 cm in de vagina in (niet verder dan tot de grijping).

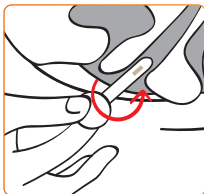


- 09** Druk de ingevoerde applicator ongeveer 10 seconden voorzichtig tegen de achterwand van de vagina (aan de kant van het rectum).

Lees het resultaat direct af na het verwijderen van de applicator uit de vagina, zolang het meetgebied nog vochtig is.

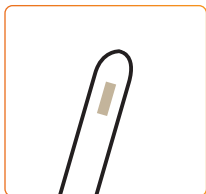


- 10**


Vergelijk de kleur van het pH-meetgebied met de kleurenkaart en kies de kleur die het dichtst bij uw meting komt.

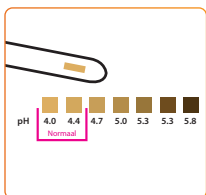

- 11** Noteer het resultaat op het bijgevoegde etiket en plak dit ook op het uitstrijkbusje. Vermeld dit resultaat bovendien bovenaan op het monsterbegeleidingsformulier.

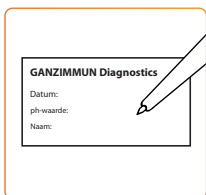

- 12** Plaats het uitstrijkbusje in het witte verzendbusje en sluit deze zorgvuldig af.

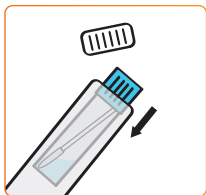

- 13** Gooi de applicator na gebruik weg bij het huishoudelijk (rest) afval.



Stap 4:

HET VERZENDEN VAN DE MONSTER

Om uw analyse uit te voeren, moet u uw test eerst activeren.

01

In het onderste gedeelte van het monsterbegeleidingsformulier bevindt zich een klantgedeelte met de benodigde QR-code. Scan de code om direct naar het invoerscherm van het klantenportaal te gaan. Hier activeert u uw test door uw persoonlijke gegevens in te voeren. Nadat u alle velden volledig hebt ingevuld, bevestigt u de testactivatie door op "Gegevens verzenden" te klikken. Maak een foto of een kopi van het monsterbegeleidingsformulier en bewaar dit zorgvuldig. Met het daarop afgebeelde serienummer en uw persoonlijke codenummer kunt u na de monsteranalyse uw uitslag online bekijken.

02

Om te verzenden plaatst u het verzendbuisje (inclusief het monster) samen met het monsterbegeleidingsformulier in de bijgevoegde retourenvelop. Wanneer alle delen in de retourenvelop zitten, verwijdert u de beschermstrip van de retourenvelop en plakt u deze dicht. Let op! De retourenvelop kan daarna niet meer geopend worden. Stuur deze op dezelfde dag terug naar ons laboratorium.



Stuur alleen complete monsterverpakkingen naar het laboratorium. Zorg ervoor dat de vereiste hoeveelheid monstermateriaal wordt aangeleverd, anders is een laboratoriumanalyse niet mogelijk.

Vul het monsterbegeleidingsformulier volledig in als u de test niet online heeft geactiveerd. Houd er rekening mee dat het in dit geval 1-2 dagen langer kan duren voordat de resultaten beschikbaar zijn.

Instructies voor het opvragen van de uitslag

Monsterbegeleidingsformulier: Veld 'praktijkgegevens'

Het veld 'praktijkgegevens' op het monsterbegeleidingsformulier moet u alleen invullen als u wordt begeleid door een zorgprofessional die bij Medivere is aangesloten.

Monsterbegeleidingsformulier / Download van uw uitslag

Wij versturen geen testuitslagen per post.

Als u een anonieme uitslag wenst, vult u op het bijgevoegde monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Voor het downloaden van uw uitslag gaat u naar onze website <https://medivere.nl/uitslag>

<https://medivere.nl/uitslag>

Hier voert u het serie- en codenummer van uw testset in. Deze vindt u op het monsterbegeleidingsformulier. Vervolgens selecteert u uw geboortedatum en klikt u op 'uitslag opvragen'. De uitslag wordt dan gedownload. Bewaar uw uitslag goed, want deze downloadlink is 2 jaar beschikbaar. Na 2 jaar wordt de uitslag verwijderd uit onze database.



Scan de QR-code om direct naar de onderzoeksresultaten te worden geleid.



Testuitslag

Geboortedatum

Symbolen en beschrijvingen op het etiket



Fabrikant

REF

Catalogusnummer



Handleiding raadplegen

LOT

Batchnummer



Te gebruiken tot (MM.JJJJ)



Niet hergebruiken



Droog bewaren



Temperatuurgrenswaarden



Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en de handleiding raadplegen



Beschermen tegen zonlicht



Let op de veiligheidswaarschuwingen

QTY

Hoeveelheid van de verpakkingsinhoud



Aluminium



Voor deze test zijn er alleen referentiewaarden beschikbaar voor vrouwen.



Let op: bijtend!

STERILE

R

Gesteriliseerd door middel van straling

Garantie

Uw tevredenheid ligt ons zeer aan het hart. Mocht uw testset niet volledig of verkeerd verpakt zijn of als u een fout hebt gemaakt bij het nemen van het monster, neem dan contact met ons op via:

Tel: +31(0)88-0075733 of **E-mail: info@medivere.nl**

Maak een kopie van het monsterbegeleidingsformulier. Het daarop vermelde serienummer en codenummer zijn nodig om u, kosteloos, nieuwe monsterafname materialen toe te sturen.



medivere GmbH Mainz
vertegenwoordigd door:
Gamedi B.V.

WAT WORDT GETEST?

Moleculair-biologische test voor het opsporen van bacteriële vaginose.

MONSTERAFFNAME

 **UITSTRIJKJE**



Indicaties: Ontstekingen, blaasontsteking

Doel: Diagnostische set voor het verkrijgen van een menselijk monster en daaropvolgend *in-vitro* diagnostisch onderzoek in een partnerlaboratorium.

Behandelingseenheid (Diagnostische set) volgens artikel 22 van Verordening (EU) 2017/745

medivere GmbH verklaart als enige verantwoordelijk te zijn dat de producten zijn gecontroleerd, verpakt volgens de aanwijzingen van de fabrikanten, de gebruikersinstructies van de fabrikanten zijn opgenomen en de samenstelling volgens de vereisten van interne controle is gecontroleerd en gevalideerd.



medivere GmbH
Hans-Böckler-Straße 109
55128 Mainz
www.medivere.de

REF

150006NL



STERILE R

4°C - 25°C



QTY 1

