

**Belangrijk:**  
Lees deze brief goed door.

## Algemene informatie voor de patiënt

Om ervoor te zorgen dat deze test op een juiste wijze wordt uitgevoerd vragen wij u om deze brief aandachtig te lezen en de instructies te volgen.

Het niet juist opvolgen van de instructies kan tot gevolg hebben dat de test opnieuw uitgevoerd moet worden. De kosten hiervan zijn helaas voor uzelf.

**Belangrijk: voer de testen alleen uit op maandag, dinsdag of woensdag. Stuur de testmaterialen op dezelfde dag door ze vóór de laatste lichte in de brievenbus te doen of naar het postkantoor te brengen. Bij extreme warmte of wanneer het vriest adviseren wij u om de materialen bij het postkantoor af te geven om zo ervoor te zorgen dat alles in goede staat blijft.**

### Vorbereiding

Controleer altijd of uw gegevens juist genoteerd zijn op de meegeleverde formulieren.



### Bloedonderzoek

Voor het stellen van een juiste diagnose kan soms een bloedonderzoek nodig zijn. Voor een bloedafname gaat u naar een (bloed-)prikpost. Hiervoor kunt u op [www.medivere.nl/zorgeloos-prikken](http://www.medivere.nl/zorgeloos-prikken) een ticket kopen. Hier rekent u gelijk de kosten voor het prikken af. Zie voor meer informatie de bijlage "Zorgeloos Prikken".

Op de eerst volgende werkdag ontvangt u een email van onze partners van PMO Nederland.

Deze email bevat ondermeer een verwijsbrief en de gegevens van een priklocatie in uw eigen omgeving waar u een afspraak kunt maken om bloed af te geven.

Print deze verwijsbrief uit en neem het, samen met alle onderdelen van de test, mee naar uw afspraak. Zonder deze verwijsbrief wordt u niet geprikt.

Het kan zo zijn dat de medewerker bij de prikpost vergeet om uw materialen aan u terug te geven. Gebeurt dit, vraagt u daar dan zelf om. Zonder deze materialen kunnen wij geen onderzoek uitvoeren.

Heeft u alle bloedbuisjes teruggekregen van de prikpost? Plaats deze volle bloedbuisjes in de verzendbuisjes en sluit die goed af. Hierna kunt u de verzendbuisjes met daarin de bloedbuisjes en de meegeleverde formulieren met de seal-bag aan ons retourneren.



medivere GmbH Mainz  
vertegenwoordigd door:  
Gamedi B.V.  
Bosberg 41  
7271 LE Borculo

Telefoon: +31-(0) 88-0075733  
of [info@medivere.nl](mailto:info@medivere.nl)

## Instructies voor de verzending

**Let op: envelop (seal-bag) niet aangetekend of met handtekeningbevestiging versturen.**

1. Controleer of alle formulieren volledig zijn ingevuld en of uw persoonlijke gegevens juist zijn. Plaats deze in de seal-bag.
2. Controleer of op alle buisjes een barcode-sticker is geplakt en of de datum en de tijd van de afname erop staan.
3. Plaats de buisjes met de onderzoeksmaterialen in de verzendbuisjes en sluit die af. Dit zorgt ervoor dat de onderzoek buisjes tijdens het vervoeren niet beschadigd raken.
4. Plaats vervolgens de verzendbuisjes in de seal-bag/retourenvelop.
5. Verwijder het plakrandje en plak de seal-bag/retourenvelop goed dicht.
6. Bewaar de seal-bag in de koelkast totdat u de seal-bag verstuurt.
7. Voor het verzenden van de seal-bag heeft u geen postzegels nodig. U kunt de seal-bag in de loop van de middag, voor de laatste buslichting in de brievenbus doen of bij een postkantoor/ PostNL Pick-up locatie afgeven.
8. Bij extreme hitte of wanneer het vriest adviseren wij u om de seal-bag bij een postkantoor of een PostNL Pick-up locatie af te geven om de invloed van het weer op de materialen te beperken.
9. Het adres waar de materialen naartoe verzonden moeten worden, staat al op de seal-bag. U hoeft dus zelf niets op de seal-bag te noteren.
10. Circa 2 weken na het opsturen van de materialen ontvangt u de uitslag.



*medivere GmbH Mainz  
vertegenwoordigd door:  
Gamedi B.V.  
Bosberg 41  
7271 LE Borculo*

*Telefoon: +31-(0) 88-0075733  
of info@medivere.nl*

## Zorgeloos Prikken

Voor “Allergo-Screen IgG voeding intolerantie” testen is veneus bloed noodzakelijk. Onze samenwerkingspartner, PMO Nederland, heeft op talloze plekken en met verschillende prikposten contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij u de mogelijkheid bieden om in uw eigen omgeving bloed te laten prikken zonder de risico afgewezen te worden.

### Hoe werkt dat?

- Ga hiervoor naar [www.medivere.nl](http://www.medivere.nl)
- Kies de optie Prikafspraak
- Klik op Zorgeloos Prikken om de aankoopstappen te kunnen doorlopen.

Hier is het mogelijk om een ticket voor PMO Nederland kopen waarmee u gegarandeerd bloed kunt laten prikken.

Hiervoor ontvangt u op de volgende werkdag via de email een verwijsbrief van PMO Nederland. U krijgt dan op basis van uw postcode een prikpost toegewezen waar u gegarandeerd geholpen wordt. Het is van belang om de mailbox goed in de gaten te houden.

U rekent de kosten voor de prikafspraak eenvoudig bij ons in de webwinkel af. PMO zoekt op basis van de postcode een prikpunt bij u in de buurt en stuur een mail aan u met daarin het adres van de priklocatie en de inlooptijden. Deze e-mail bevat ook een verwijsbrief. Het is belangrijk dat u deze verwijsbrief uitprint en samen met het priksetje mee neemt naar het prikpunt. U draagt zelf zorg voor de distributie van het priksetje.

### Let op:

De bloedmonsters kunnen alleen op maandag, dinsdag en woensdag worden opgestuurd, dit betekent dat u alleen op deze dagen kunt bloed laten prikken.



*medivere GmbH Mainz  
vertegenwoordigd door:  
Gamedi B.V.  
Bosberg 41  
7271 LE Borculo*

*Telefoon: +31-(0) 88-0075733  
of  
info@medivere.nl*