

Aanwijzingen voor het opvragen van de uitslag / Garantie informatie

LET OP! BEWAAR HET SERIE- EN CODENUMMER VAN UW TESTSET!

Deze codes heeft u nodig voor het verkrijgen van uw uitslag. U vindt deze codes op de binnen- of buitenzijde van het testpakket.

Monsterbegeleidingsformulier: Veld „praktijkgegevens”

Wanneer u wilt dat uw behandelend therapeut / arts uw uitslag ook ontvangt, vul dan in het veld 'praktijkgegevens' het praktijkadres in. (Wanneer er een praktijkcode bekend is, dan volstaat deze praktijkcode ook). Uw therapeut / arts ontvangt dan een uitslag met aanvullend therapie-advies. NB. aan particulieren worden nooit therapie adviezen verstrekt.

Na het invullen van serie-, codenummer en geboortedatum klikt u op 'uitslag opvragen' om uw persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam en adresgegevens) wenst, dan vult u op het monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten echt ingevuld worden, anders is er geen vergelijking mogelijk met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Download van uw uitslagen

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze website www.medivere.nl en klikt u op het tabblad 'uitslag opvragen'. Onder 'uitslag opvragen' vult u het serie- en codenummer van uw testpakket en uw geboortedatum in. Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons product. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren van de test iets misgegaan, neem dan contact met ons op. Kijk op www.medivere.nl bij 'vragen?', bel naar **088-0075733** of mail naar info@medivere.nl. Houd het serie- en codenummer van uw testset bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de binnen of buitenkant van uw testset. Wij sturen u zo spoedig mogelijk de benodigde onderdelen toe.



medivere GmbH Mainz

*vertegenwoordigd door:
Gamedi B.V.*

*Telefoon: +31 (0) 88-0075733
of info@medivere.nl*

Handleiding voor monsterafname

Eerste straal ochtendurine

Vooraf: Lees eerst de handleiding **helemaal** door voordat u aan de uitvoering van de test begint!

Is uw testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of uw testset volledig is. Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Garantieformulier
- 1 Urinebuisje (monovette)
incl. etiket en geel tuitje
- 1 Urinebeker
- 1 verzendbuisje
- 1 Verzendenvelop

Deze handleiding geldt voor de volgende testen:

STI

STI Plus

*(sexual transmitted infections;
seksueel overdraagbare infecties)*



De verzending moet plaatsvinden op maandag of dinsdag (voor de buslichting) en niet in het weekeinde of voor feestdagen.

Stop het monster bij extreme hitte of vorst niet in de brievenbus, maar geef het monster af op het postkantoor.

Test-Voorbereiding

1. We adviseren u om op de avond voor de monsternaam en 's nachts het nuttigen van grote hoeveelheden vloeistof (meer dan 1 liter) te vermijden.
2. Voor het opvangen van de eerste straal ochtendurine, mag gedurende ongeveer 6 uur ('s nachts) geen urine worden uitgescheiden.

Houd rekening met het volgende:

Als u na middernacht moet plassen en er zijn ongeveer 6 uur verstreken sinds de laatste keer plassen, dan kan ook dit urinemonster gebruikt worden.

Z.O.Z.

Test-Uitvoering

1. Als monster wordt de eerste straal urine van de eerste ochtendurine gebruikt.
2. Vang de allereerste 15-20 ml van uw ochtendurine op in de urinebeker en laat vervolgens de rest in het toilet lopen.
3. Pak nu het gele tuitje en het gele urinebuisje, draai het voorste deel van de gele dop eraf en zet het tuitje erop.
4. Doop het gele tuitje in de urine en neem met dit buisje een deel van de urine uit de urinebeker door van achter de stempel volledig uit te trekken. Het urinebuisje moet volledig gevuld worden.
5. Haal het gele tuitje ervan af en sluit vervolgens het urinebuisje weer zorgvuldig met de gele dop.
6. Breek de uitgetrokken stempel bij het afbreekpunt af zodat deze niet meer uitsteekt.
7. Doe het urinebuisje in het verzendbuisje en sluit het verzendbuisje goed.
8. Het tuitje, de afgebroken stempel en de urinebeker kunt u bij het huisvuil doen.
9. Doe het verzendbuisje samen met het ingevulde en ondertekende monsterbegeleidingsformulier in de verzendvelop en stuur deze per post aan ons laboratorium retour.

De retourzending moet op maandag of dinsdag (voor de buslichting) plaatsvinden en niet in het week-einde of voor feestdagen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Uw medivere-team



*medivere GmbH Mainz
vertegenwoordigd door:
Gamedi B.V.
Telefoon: +31 (0) 88-0075733
of info@medivere.nl*