

Aanwijzingen voor het opvragen van de uitslag / Garantie informatie

LET OP! BEWAAR HET SERIE- EN CODENUMMER VAN UW TESTSET!

Deze codes heeft u nodig voor het verkrijgen van uw uitslag. U vindt deze codes op de binnen- of buitenzijde van het testpakket.

Monsterbegeleidingsformulier: Veld „praktijkgegevens”

Wanneer u wilt dat uw behandelend therapeut / arts uw uitslag ook ontvangt, vul dan in het veld ‘praktijkgegevens’ het praktijkadres in. (Wanneer er een praktijkcode bekend is, dan volstaat deze praktijkcode ook). Uw therapeut / arts ontvangt dan een uitslag met aanvullend therapie-advies. NB. aan particulieren worden nooit therapie adviezen verstrekt.

Na het invullen van serie-, codenummer en geboortedatum klikt u op ‘uitslag opvragen’ om uw persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam en adresgegevens) wenst, dan vult u op het monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten echt ingevuld worden, anders is er geen vergelijking mogelijk met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Download van uw uitslagen

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze website www.medivere.nl en klikt u op het tabblad ‘uitslag opvragen’. Onder ‘uitslag opvragen’ vult u het serie- en codenummer van uw testpakket en uw geboortedatum in. Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons product. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren van de test iets misgegaan, neem dan contact met ons op. Kijk op www.medivere.nl bij ‘vragen?’, bel naar **088-0075733** of mail naar info@medivere.nl. Houd het serie- en codenummer van uw testset bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de binnen of buitenkant van uw testset. Wij sturen u zo spoedig mogelijk de benodigde onderdelen toe.



medivere GmbH Mainz

*vertegenwoordigd door:
Gamedi B.V.*

*Telefoon: +31 (0) 88-0075733
of info@medivere.nl*

Handleiding voor monsterafname

Eerste Ochtendurine

Vooraf: Lees eerst de handleiding helemaal door voordat u aan de uitvoering van de test begint!

Is uw testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of uw testset volledig is. Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten **Handleiding voor het opvragen van de uitslag / Garantie informatie**
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Garantieformulier **weghalen / entfernen**
- 1 Urinebuisje (Monovette), incl. etiket en geel tuitje
- 1 Urinebeker
- 1 Verzendsbuisje
- 1 Verzendenvelop

Deze handleiding geldt voor de volgende testen:

Estronex®

Glyfosaat

Jodiumtest

Oxidatieve Stress

Viscera® niet meer in ass / weghalen / entfernen

Vitamine B12

Zware metalen Urinetest Basis

Zware metalen Urinetest Plus

Test-Vorbereitung

We verzoeken u vriendelijk met het onderstaande rekening te houden.

1. Als u 's nachts vaak moet plassen, moet de urine verzameld worden. Een verzamelcontainer kunt u aanvragen via Tel. **+31 - (0)88 - 00 75 777** of **info@medivere.nl**. Verzamel dan de nachtelijke urineproductie vanaf 00.00 uur en vermeng deze met de eerste ochtendurine meteen na het opstaan. Uit deze verzameling urine neemt u de benodigde urinehoeveelheid d.m.v. de urinemonovette (zie Test-Uitvoering).
2. Vermijd de inname van grote hoeveelheden vloeistof (meer dan 1 liter) in de avond en nacht voor de monsternaam.
3. Belangrijke informatie voor vrouwen: doe deze test niet tijdens uw menstruatie.

Test-Uitvoering

1. Voor de monsternaam gebruikt u de eerste ochtendurine. Let erop dat minstens 8 uur na de laatste maaltijd verstreken moeten zijn!
2. Gebruik voor het urinemonster de urine halverwege. Dat wil zeggen: laat eerst wat urine in het toilet lopen; de volgende urine vangt u op in de urinebeker. Deze moet tot ongeveer de helft worden gevuld. De overige urine laat u weer weglopen in het toilet.
3. Neem nu een tuitje en het gele urinebuisje in de hand, draai van het voorste deel de gele afsluiting af en zet hier het tuitje op.

4. Doop het gele tuitje in de urine en neem met dit buisje een deel van de urine uit de urinebeker door van achter de stempel volledig uit te trekken. Het urinebuisje moet volledig gevuld worden.
5. Haal het gele tuitje er weer vanaf en sluit vervolgens het urinebuisje zorgvuldig met de gele afsluiter.
6. Breek de uitgetrokken stempel bij het afbreekpunt af zodat deze niet meer uitsteekt.
7. Doe het urinebuisje in het verzendbuisje en sluit het verzendbuisje zorgvuldig.
8. Het tuitje, de afgebroken stempel en de urinebeker kunnen bij het huishoudelijke afval.
9. Stop het verzendbuisje samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de verzendenvelop. Stuur deze envelop retour naar ons laboratorium.

De retourzending moet op maandag en dinsdag (voor de buslichting) plaatsvinden en niet in het week-einde of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team



*medivere GmbH Mainz
vertegenwoordigd door:
Gamedi B.V.
Telefoon: +31 (0) 88-0075733
of info@medivere.nl*